

## VÉLEMÉNYEZÉS

### AT 2 Profi

---

Lenti, Szakorvosi Rendelőintézet  
Bacsa Józsefné Gyógytornász:

**„1. program**

- Gerincsérves betegeknél
- Kisugárzó fájdalomnál használtam.

A kezelések alatt folyamatosan csökkent a fájdalom; könnyebb volt a mobilizálás.

**2. program:**

- N. radialis sérülésnél – nem volt teljes, csak részleges lézió
- Bemozgatta az izmokat, segítette az izomerősítést.

**3. program:**

- Bokazúódásos betegnél használtam a peroneális izmok ingerlésére

**4. program:**

PHS coxartkrosis nagy területet tudtam befogni a 4 elektródával, jól csillapította a fájdalmat

**5. program:**

Porckorongsérv, műtét utáni állapot: lazulást nem, de fájdalomcsillapító hatást tudtam elérni

**6. program:**

Bokatörés után /trimall. törés+bokaficam/, gipszlevételt követően nagyon ödémás volt az alsó végtag, jelentősen csökkent az ödéma már a 2. kezelés után. Ezután eredményesebb volt a torna.

**7. program:**

Keresztszalagműtétet követő rehabilitációs szakaszban az izomedzés részeként használtam.

**8. program:**

Nyaki spondylosis miatti fájdalomcsillapításra használtam. Az izomzat lazult, fájdalom csökkent.

**9. program:**

Térdprotézises betegnél – m. quadriceps erősítéséhez, 3 hétig használtam torna mellett. Hatására a m. quadriceps izomereje gyorsabban nőtt, tónusa, izomereje további növeléshez más programot használtam.

**10. program:**

Térdzúódás utáni hematomakezeléshez használtam, és tornával 3 hét alatt felszívódott a hematoma.

**11. program:**

Nem használtam.

**12. program:**

Lapocka – vállöv körüli izmok fájdalomcsillapítására használtam. Nagyon jól csillapította a fájdalmat!

Lenti, 2005.07.06.

Bacsa Józsefné gyógytornász

Lenti, Szakorvosi Rendelőintézet”